

Audicom	مدل دستگاه :
پروتکل خاموش کردن دستگاه برای تعطیلات طولانی مدت	توضیحات :
واحد پشتیبانی	ارسال شده از طرف :
۰۹۳۵۲۷۵۰۴۶۵-۷۱	تلفن تماس :
www.sepehranalyze.com	سایت شرکت :
۱۴۰۱/۱۲/۱۶	تاریخ ثبت:
حسین پارسافر	تهیه کننده:

خاموش کردن دستگاه برای مدت طولانی

1. تمام محلولها را برداشته و درب آنها را محکم ببندید.
 2. به جای محلولها اب مقطر قرار داده و دستگاه را روشن نموده و برنامه self-test را اجرا نمایید .
 3. مجدد دستگاه را خاموش نموده و مجدد روشن کرده و برنامه مرحله ۲ را تکرار نمایید.
 4. دستگاه را خاموش نموده .
 5. ستون کروماتوگرافی را خارج کرده و آنرا در ظرف مخصوص خود قرار دهید
 6. تیوپ پمپ را آزاد نمایید.
 7. تیوپ فاضلاب را خارج نموده و حدود ۲۰ سی سی اب مقطر از طریق سرنگ ۱۰ سی سی تزریق نمایید تا محلول نمکی از بوستر دستگاه خارج گردد ، مجدد چند بار با سرنگ خالی هوا تزریق نمایید تا اطمینان حاصل کنید که بوستر از محلول خالی گردد.
 8. ظرف فاضلاب را خالی کنید
 9. دستگاه را خاموش نمایید
- برای روشن کردن مجدد دستگاه پس از انجام مراحل اولیه یک نمونه را چند بار به دستگاه داده تا نتایج ثابت بدست آید ، سپس با دستگاه کار کنید.

قبل از تعویض یا جایگذاری ستون کروماتوگرافی حتما اتصالات آن را چک کنید.