

تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۱۶

مدل دستگاه:	تمام مدل های دستگاه سل کانتر Mythic
توضیحات:	پروتکل اجرایی تعطیلات نوروزی
ارسال شده از طرف:	واحد پشتیبانی شرکت سپهرانالیز
تلفن تماس:	۰۹۳۵۲۷۵۰۴۶۵-۷۱
سایت شرکت:	www.sepehranalyze.com

## A. محصول:

- سل کانتر های Mythic 18- Mythic 22OT – Mythic 22AL

## B. توضیحات:

- برنامه کاربردی تعطیلات نوروزی
- 1. تمام تیوبها را از ظروف خود خارج کنید و درون نیم لیتر آب مقطر قرار دهید
- 2. از منوی Reagent گزینه Prime All را اجرا کنید. (5 مرتبه)
- 3. از منوی اصلی گزینه Start Up را اجرا نمایید. (3 مرتبه)
- 4. تمام تیوب ها را از اب مقطر خارج نمایید و درون هیچ محلولی قرار نداشته باشند ( آزاد باشند)
- 5. از منوی Reagent گزینه Prime All را اجرا کنید. (4 مرتبه)
- 6. تیوب ها را با الکل 70% تمییز کنید و دور از گرد و خاک قرار دهید.
- 7. دستگاه را از قسمت پاور (دکمه قرمز رنگ) خاموش نمایید
- 8. کابل پاور دستگاه را از پشت دستگاه خارج نمایید

## نکته:

درمورد دستگاه های مدل 22AL بعد از اتمام پروتکل کاری فیلتر دستگاه را با اب شهر شستشو و سپس با اب مقطر ابکشی نموده و در جای خود قرار دهید.

## پس از اتمام تعطیلات

1. لطفا دستگاه را روشن نموده
2. تیوب ها درون محلول مختص خود قرار گرفته ( ترجیحا محلول های استفاده نشده )
3. با پسورد وارد منوی اصلی شده
4. **Mythic 18 = 18ST & 53B2 – Mythic 22OT = MAPD & W4K9 – Mythic 22AL = ER01 & 5TZU**
5. از منوی Reagent گزینه Prime All را اجرا کنید. (3 مرتبه)
6. از منوی اصلی گزینه Start Up را اجرا نمایید. (2 مرتبه)
7. وارد منوی Operator Log Out میشویم و بدون پسورد وارد منوی اصلی شده و شروع به کار مینماییم